


Instrucciones de uso para el inhalador con dosificador

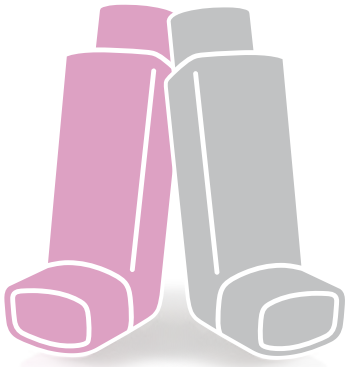

Limpieza:

Limpie el exterior y el interior de la boquilla una vez a la semana con un paño seco (sin agua).


Almacenamiento:

No almacenar a temperaturas superiores a 25° C ni exponerlo al sol o al frío. Para más información, consulte el prospecto.

Cómo inhalar correctamente paso a paso



1 Por favor, verifique el contador de dosis antes de la inhalación, quite la tapa protectora de la boquilla y asegúrese de que la boquilla esté libre de cuerpos extraños.

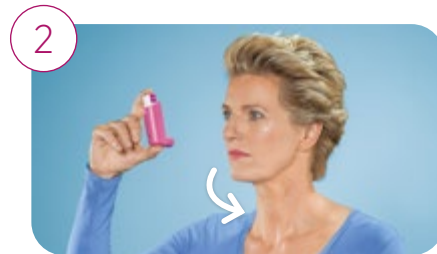

2 Exhale lenta y profundamente – no respire hacia el inhalador.



3 Sostenga el inhalador con el pulgar y el dedo índice o corazón (como se muestra). Rodee la boquilla con los labios e incline ligeramente su cabeza hacia atrás.



4 Presione la parte superior del inhalador hacia abajo para liberar una dosis mientras inspira profunda y lentamente por la boca.



5 Mantenga la respiración de 5 a 10 segundos o tanto como le sea posible sin esfuerzo. Luego retire el inhalador de su boca.



6 Exhale lentamente por la nariz o por los labios casi cerrados (frenado labial). Vuelva a colocar la tapa protectora y verifique nuevamente el contador de dosis, que disminuye con cada uso. Para un segundo uso, mantenga el inhalador en posición vertical durante aproximadamente medio minuto y luego repita los pasos del 2 al 6.